



LIKO-M MINI

LIKO-M

MINI



Имплантаты серии LIKO-M MINI используются для фиксации и стабилизации полных и частичных съемных протезов. Также данные имплантаты применяют в качестве временных имплантатов для фиксации на них временных несъемных мостовидных конструкций. Хирургический протокол установки имплантатов LIKO-M MINI – минимально инвазивная операция, которая выполняется без разреза и отслаивания слизисто-надкостничного лоскута. Благодаря небольшому диаметру, данные имплантаты являются незаменимыми при тонкой альвеолярной кости, в случаях, когда не проводится костная пластика. Имплантаты LIKO-M MINI разработаны для использования в костной ткани любого

качества: как с высокой, так и с низкой плотностью, что имеет определяющее важное значение при их использовании для немедленной нагрузки.

Наддесневая часть имплантата разработана специально для того, чтобы обеспечить индивидуальную ретенцию в каждом отдельном случае с помощью трех видов ретенционных элементов. Помимо этого крепления способны скорректировать расхождение между осями двух имплантатов до 30°.

При ослаблении крепления протеза на имплантатах LIKO-M MINI, первоначальная ретенция может быть восстановлена путем простой замены резиновых колец.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Изделия из титана Grade 4.
- Пескоструйная обработка и травление для увеличения контактной поверхности.
- Самонарезающие витки для лучшего введения и первичной стабильности имплантата.
- Каждый имплантат упакован с пластиковой пробкой, что позволяет произвести позиционирование вручную без риска контаминации.
- Предлагаются имплантаты диаметров 2,0 мм/2,4 мм/2,5 мм и длины 10 мм/13 мм/15 мм.


LIKO-M MINI С ШАРОВИДНОЙ НАДДЕСНЕВОЙ ЧАСТЬЮ

Данная серия имплантатов дает возможность обеспечить немедленную и долгосрочную стабильность съемных протезов. Кроме того, она позволяет получить высокую первичную стабильность и допускает немедленную нагрузку. Костное ложе под имплантат можно сформировать с формированием слизисто-надкостничного лоскута или без - трансгингивально.



ø 2,0

L. 10 - MD/20/10
L. 13 - MD/20/13
L. 15 - MD/20/15

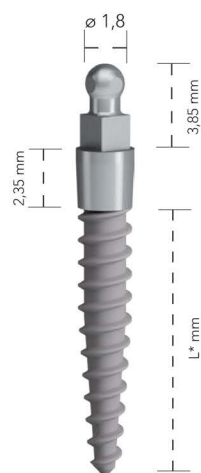


ø 2,4

L. 10 - MD/24/10
L. 13 - MD/24/13
L. 15 - MD/24/15


LIKO-M MINI С КВАДРАТНОЙ НАДДЕСНЕВОЙ ЧАСТЬЮ

Имплантаты с квадратной наддесневой частью обеспечивают превосходную первичную стабильность и допускают немедленную нагрузку. Используются прежде всего во фронтальных отделах для восстановления латеральных резцов, клыков и премоляров. Данные имплантаты обеспечивают первичную стабильность и допускают немедленную нагрузку. Костное ложе под имплантат можно сформировать с формированием слизисто-надкостничного лоскута или без – трансгингивально.

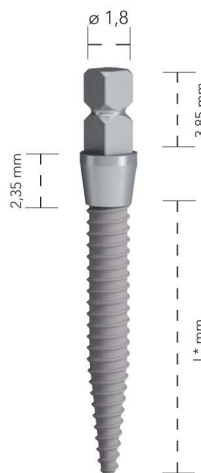

ø 2,4

L. 10 - MA/24/10
L. 13 - MA/24/13
L. 15 - MA/24/15

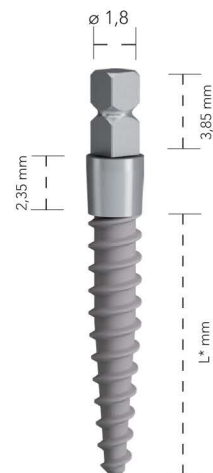


ø 2,5

L. 10 - MA/25/10
L. 13 - MA/25/13
L. 15 - MA/25/15


ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ




1 Прохождение кортикального слоя пилотной фрезой диаметром 1.5 мм, непосредственно через слизистую оболочку. Места введения имплантатов предварительно можно обозначить на слизистой оболочке стерильным зондом.

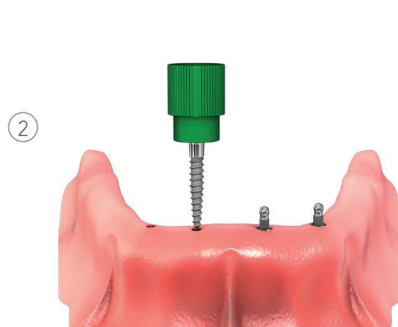


2 Введение имплантата при помощи пластикового держателя в костное ложе. Имплантат ввинчивается до момента появления сопротивления

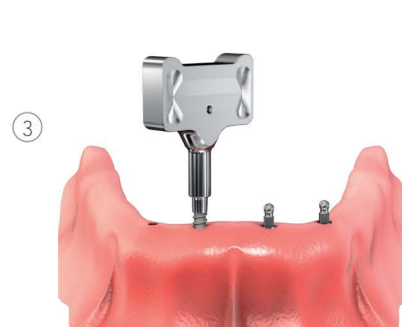

3 Далее снимается пластиковый держатель и имплантат вкручивается ключом типа "бабочка". При затрудненном введении имплантата следует воспользоваться динамометрическим ключом-трещоткой.

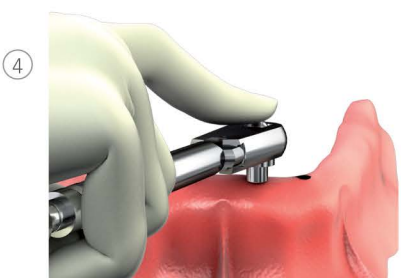

4 Использование динамометрического ключа для окончательного введения мини имплантата

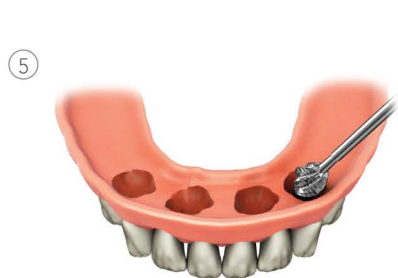

5 Формирование углублений в протезе, в проекции установленных имплантатов, где будут размещены металлические матрицы.



6 Установка протеза в ротовой полости пациента при помощи самотвердеющей пластмассы, применяя усилие характерное для нормального прикуса в состоянии центральной окклюзии.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР для серии имплантатов LIKO-M MINI

ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР (СТЕРИЛИЗУЕМЫЙ) ВКЛЮЧАЕТ:


1 КЛЮЧ ТИПА "БАБОЧКА"
MD-3002

2 ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА Ø 1.5
MD-3001

3 ОСНОВНАЯ ФРЕЗА Ø 2
MD-3001/20

4 НАСАДКА ДЛЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА-ТРЕЩОТКИ
Длинная: MD-3003L Короткая: MD-3003S

5 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА
00376DIN

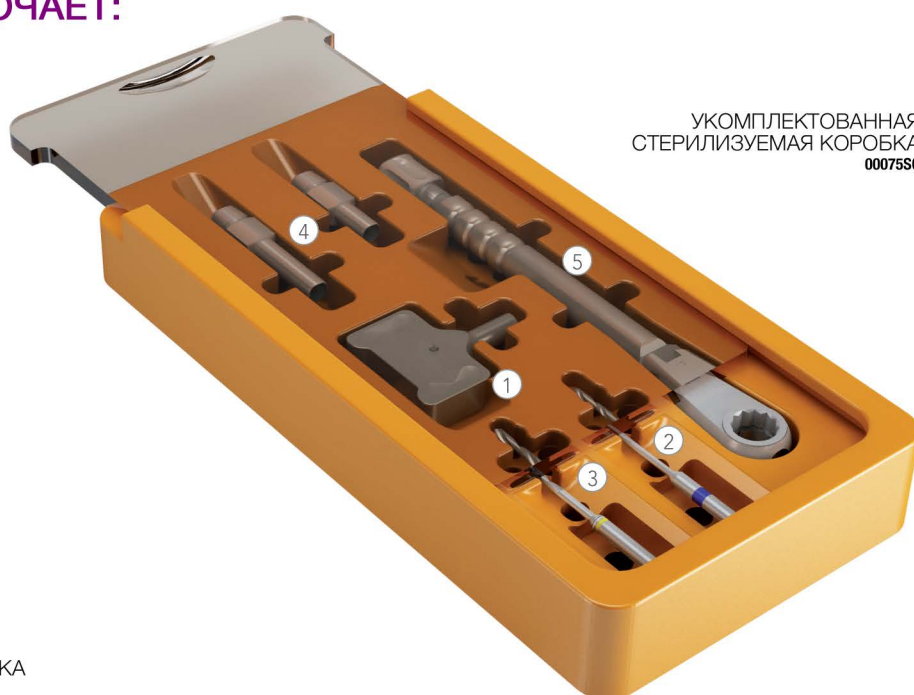

УКОМПЛЕКТОВАННАЯ
СТЕРИЛИЗУЕМАЯ КОРОБКА
00075SC

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ИМПЛАНТАТ
С ШАРОВИДНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ



ИМПЛАНТАТ
С КВАДРАТНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ



АНАЛОГ
С ШАРОВИДНОЙ
ГОЛОВКОЙ
MD-3007



АНАЛОГ
С КВАДРАТНОЙ
ГОЛОВКОЙ
MA-1007

КОЛПАЧКИ
ДЛЯ ШАРОВИДНОГО КРЕПЛЕНИЯ



ВРЕМЕННЫЙ
КОЛПАЧОК
MD-3013



ОТТИСКНОЙ
КОЛПАЧОК
MD-3014

ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ



MD-3010

ТРАНСФЕР/
ВЫЖИГАЕМАЯ ВТУЛКА




MD-3006

ЗАЩИТА ИЗ ПВХ



MD-3008

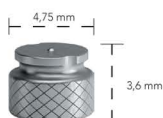

НИЗКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/1



СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004



ВЫСОКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/2



РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО
(БОЛЬШОЕ)
MD-3005/1 (5 шт.)



РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО
(МАЛЕНЬКОЕ)
MD-3005 (5 шт.)